

TECHNIKA OPERACYJNA



MEDGAL[®]

ORTHOPAEDIC IMPLANTS & INSTRUMENTS


WKRETY KANIULOWANE




ZAMIESZCZONE WSKAZÓWKI NIE SĄ SZCZEGÓŁOWĄ INSTRUKCJĄ POSTĘPOWANIA!

WYBÓR WŁAŚCIWEJ TECHNIKI OPERACYJNEJ LEŻY W GESTII LEKARZA.


PALETA

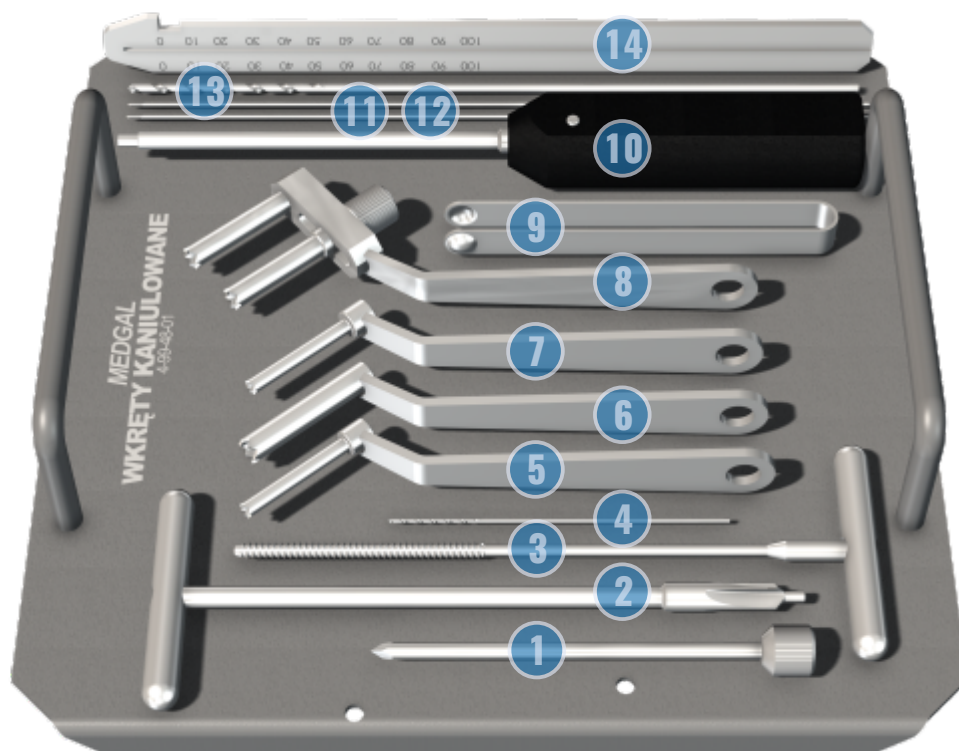

- | | | |
|----|------------|--|
| 1 | 4-48-01-36 | Trokar |
| 2 | 4-48-01-07 | Pogłębiacz kaniulowany |
| 3 | 4-48-01-11 | Gwintownik $\varnothing 1.2\text{mm} + \varnothing 4.6\text{mm}$ |
| 4 | 4-40-01-10 | Wiertło $\varnothing 1.0\text{mm}$ |
| 5 | 4-48-01-17 | Prowadnik wiertła $\varnothing 3.2\text{mm}$ |
| 6 | 4-48-01-24 | Ośłona gwintownika $\varnothing 4.6\text{mm}$ |
| 7 | 4-48-01-15 | Prowadnik wiertła $\varnothing 1.2\text{mm}$ |
| 8 | 4-48-01-22 | Prowadnik równoległy $\varnothing 1.2\text{mm}$ |
| 9 | 4-48-01-40 | Pęseta do wkrętów |
| 10 | 4-48-01-14 | Wkrętak kaniulowany S 3.5 |
| 11 | 4-48-01-26 | Drut prowadzący gwintowany |
| 12 | 4-48-01-28 | Drut Kirschnera |
| 13 | 4-48-01-32 | Wiertło $\varnothing 3.2\text{mm}$ |
| 14 | 4-48-01-20 | Miarka długości wkręta |

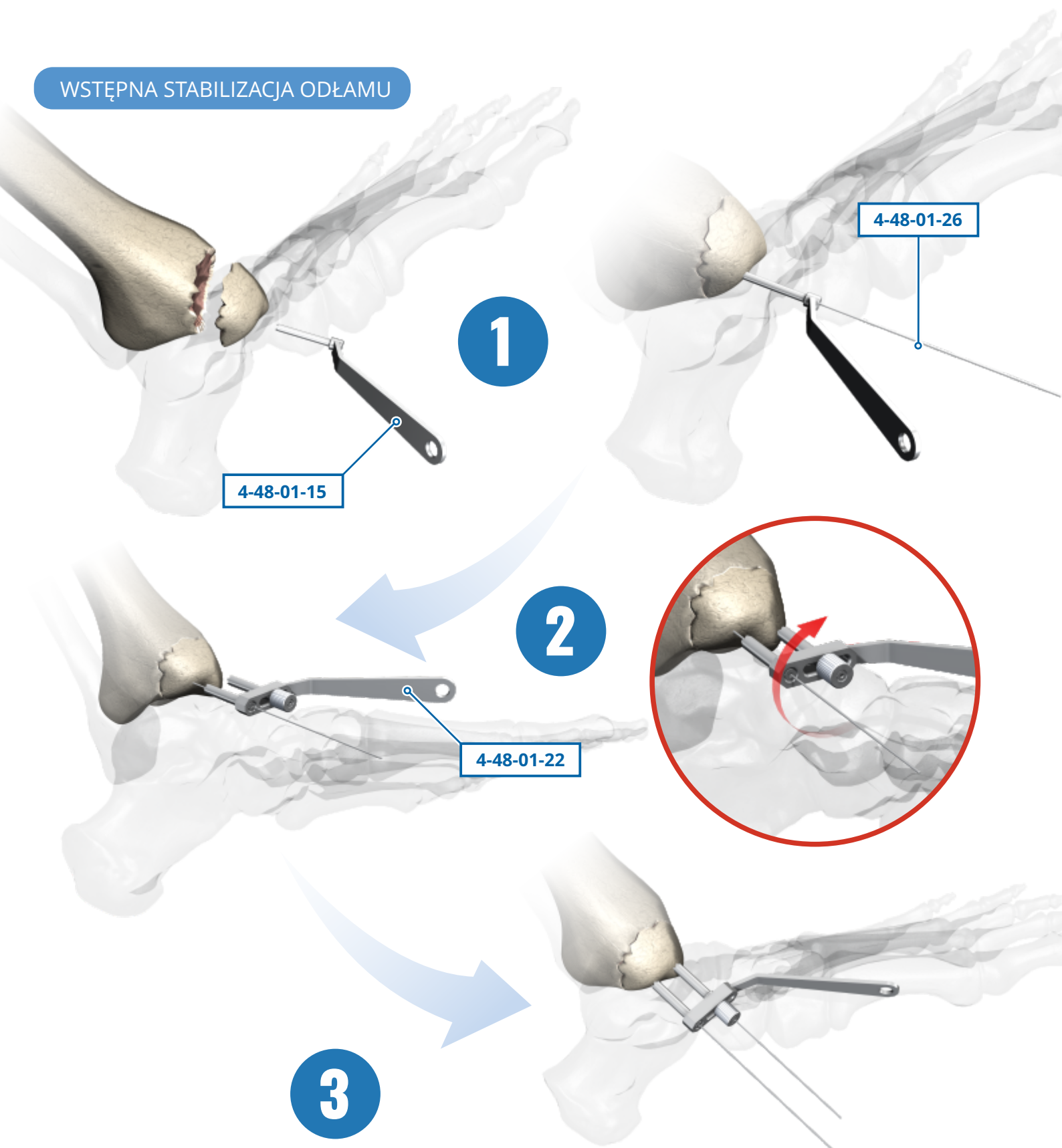
WSTĘPNA STABILIZACJA ODŁAMU

1. Ustabilizuj odłam przy pomocy druta 4-48-01-26 używając prowadnika 4-48-01-15 .
2. Zmień prowadnik na równoległy 4-48-01-22 i ustal właściwą pozycję. Zablokuj tuleję.
3. Wprowadź kolejny drut prowadzący 4-48-01-26 .

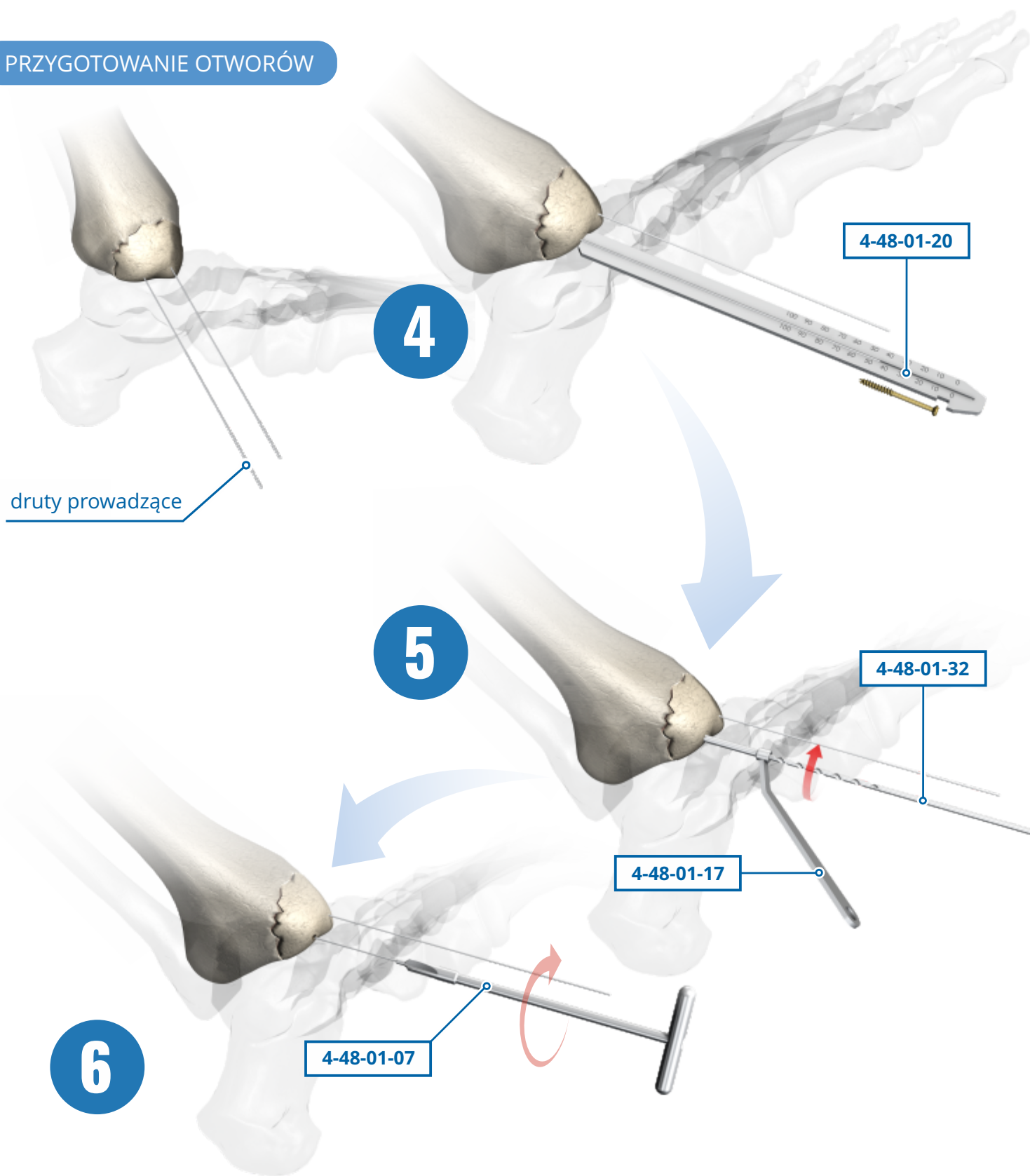PRZYGOTOWANIE OTWORÓW

4. Dokonaj pomiaru głębokości wiercenia i dobierz odpowiedni wkręt używając miarki 4-48-01-20 .
5. Przy pomocy prowadnika 4-48-01-17 wykonaj otwór wiertłem 4-48-01-32 . Wierć pod kontrolą RTG.
6. Powiększ otwór pod łeb wkręta pogłębiaczem 4-48-01-07 .

WKRETY KANIULOWANE

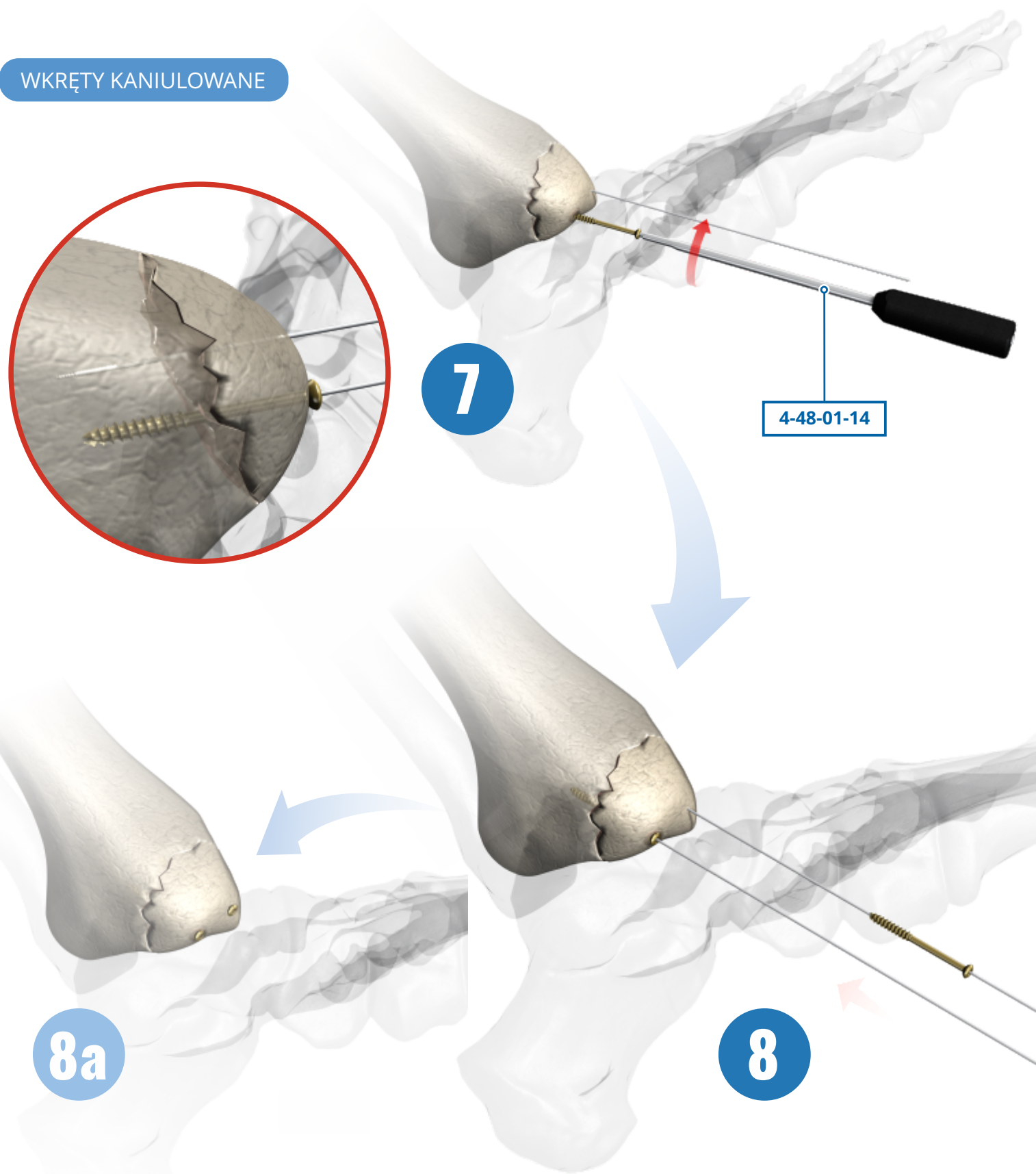

7. Wprowadź odpowiedni wkręt kaniulowany przy pomocy wkrętaka 4-48-01-14 .

8. Tą samą metodą wprowadź kolejny wkręt kaniulowany.

W celu zminimalizowania podrażnienia tkanek miękkich, łby wkrętów powinny być zagłębione w kości.

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

MEDGAL[®]

ORTHOPAEDIC IMPLANTS & INSTRUMENTS

MEDGAL[®] Sp. z o.o.
16-001 Księżyno k/Białegostoku
ul. Niewodnicka 26A

SPRZEDAŻ i MARKETING

info@medgal.com.pl
tel.:+48 85 6632 999

CENTRALA

tel.:+48 85 6632 344
fax+48 85 6632 622

