

**TECHNIKA OPERACYJNA**



***MEDGAL***<sup>®</sup>

ORTHOPAEDIC IMPLANTS & INSTRUMENTS

WKRETY KOMPRESYJNE






ZAMIESZCZONE WSKAZÓWKI NIE SĄ SZCZEGÓŁOWĄ INSTRUKCJĄ POSTĘPOWANIA!

WYBÓR WŁAŚCIWEJ TECHNIKI OPERACYJNEJ LEŻY W GESTII LEKARZA.


## PRZYGOTOWANIE ODŁAMU

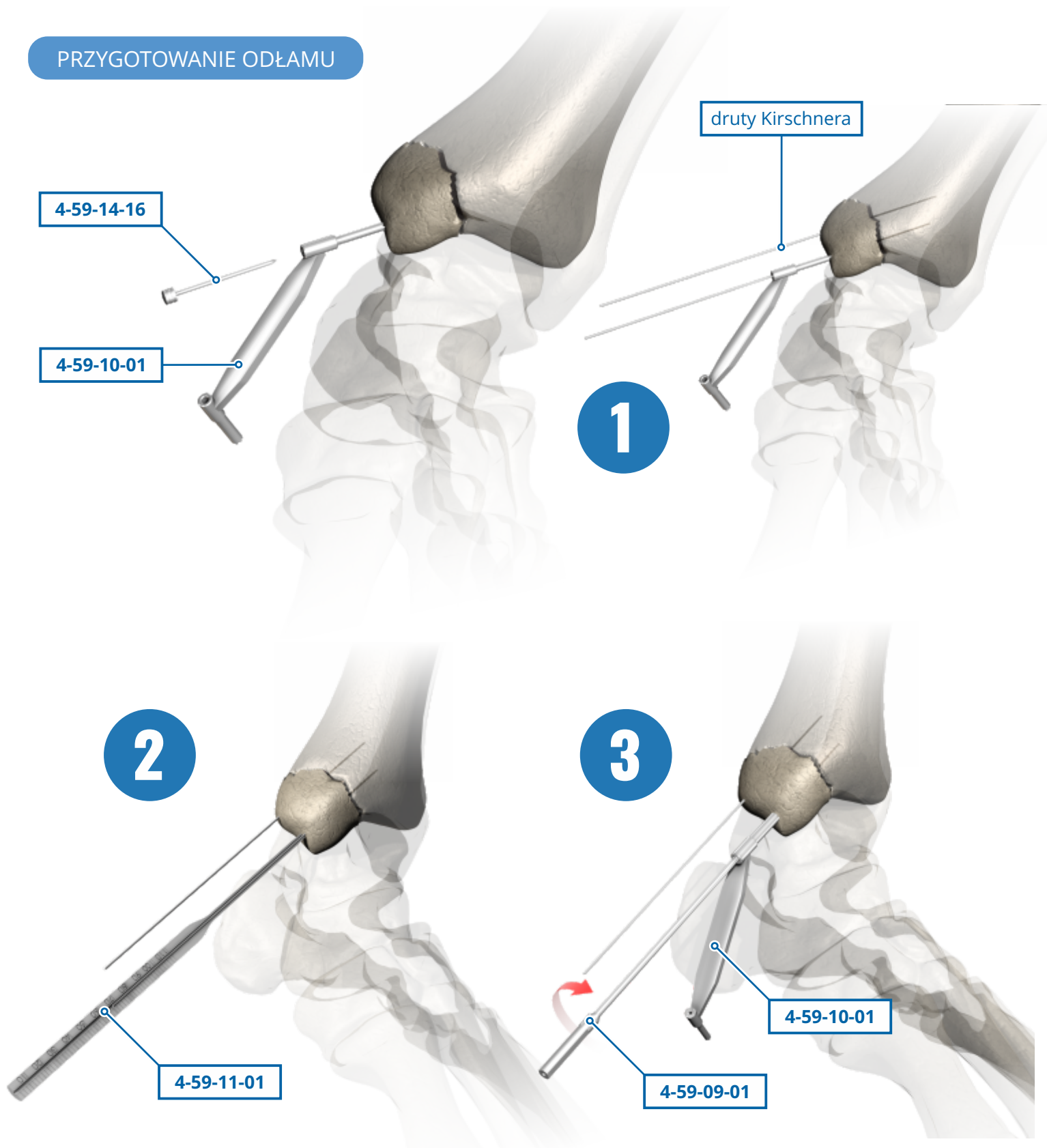

1. Ustabilizuj wstępnie odłam drutami Kirschnera używając prowadnika 4-59-10-xx .  
Drut Kirschnera nie powinien przebić drugiej korówki.
2. Użyj miarki 4-59-11-xx by określić głębokość wiercenia i dobrać wkręt.
3. Wykonaj otwór używając wiertła trepanacyjnego 4-59-09-xx .

## PRZYGOTOWANIE WKRĘTA

4

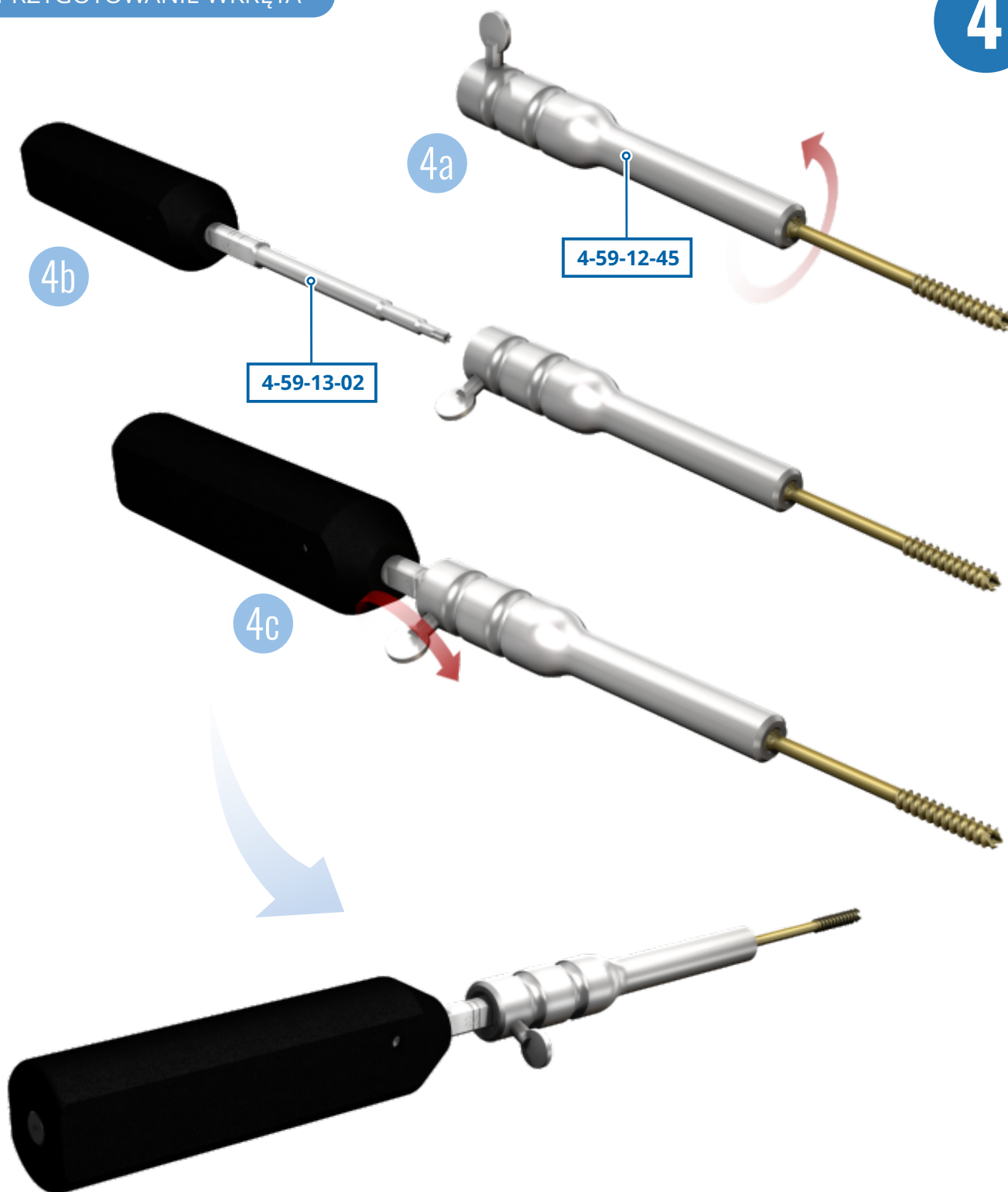


**4a.** Połącz tuleję 4-59-12-xx z dobranym wkrętem kompresyjnym.

**4b.** Wprowadź do tulei odpowiedni wkrętak 4-59-13-xx.

**4c.** Zablokuj wkrętak w tulei 4-59-12-xx przy pomocy śruby blokującej.

## KOMPRESJA ODŁAMU

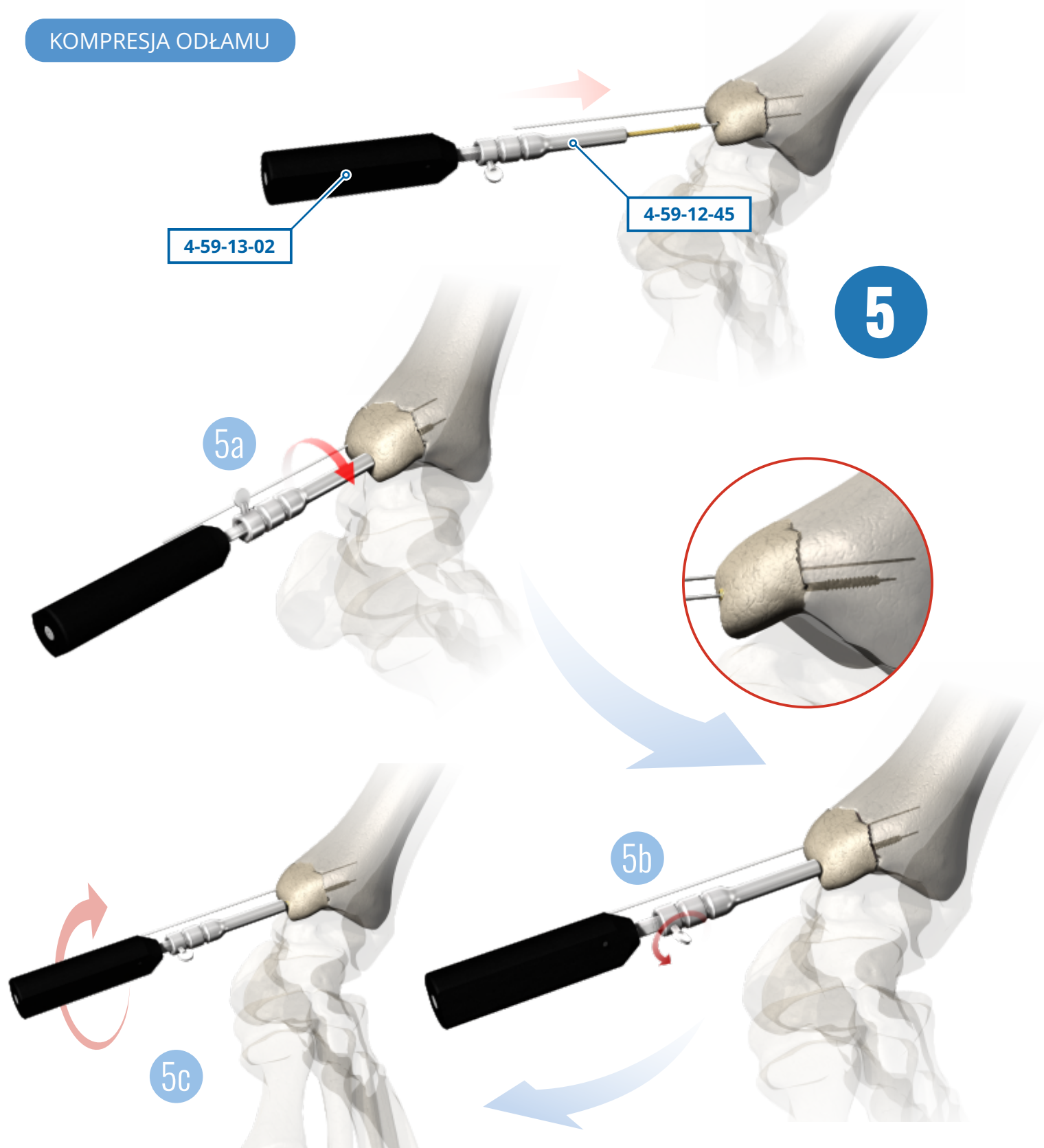


**5a.** Wprowadź wkręt kompresyjny zamontowany na tulei 4-59-12-xx z wkrętakiem 4-59-13-xx .

**5b.** Poluzuj zacisk tulei kompresyjnej.

**5c.** Dokręć wkręt kompresyjny wkrętakiem, wykonując kompresję odłamu.



## ZAKOŃCZENIE

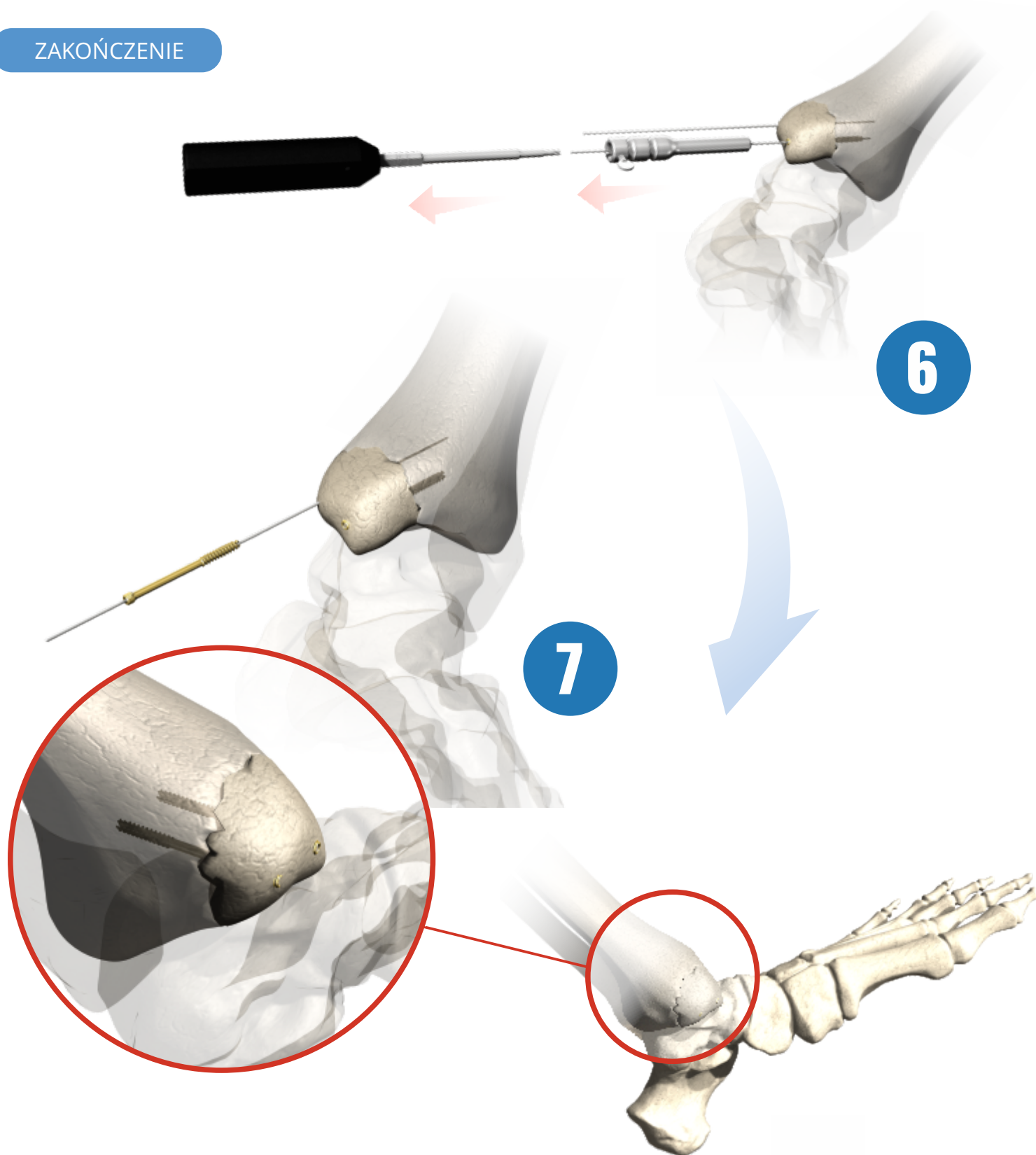

6. Usuń drut Kirschnera oraz tuleję wraz z wkrętakiem.
7. Wprowadź kolejny wkręt metodą jak poprzednio. Dokonaj pomiaru głębokości wiercenia. Dobierz odpowiednią tuleję kompresyjną i wkręt. **OSTATECZNIE** łeb wkręta powinien znaleźć się ok. 1 mm poniżej kości korowej, by zminimalizować ryzyko drażnienia tkanek miękkich.











# **MEDGAL**<sup>®</sup>

**ORTHOPAEDIC IMPLANTS & INSTRUMENTS**

**MEDGAL**<sup>®</sup> Sp. z o.o.  
16-001 Księżyno k/Białegostoku  
ul. Niewodnicka 26A

## **SPRZEDAŻ i MARKETING**

info@medgal.com.pl  
tel.:+48 85 6632 999

### **CENTRALA**

tel.:+48 85 6632 344  
fax+48 85 6632 622

